

Ihre Lupe ist ein optisches Präzisionsgerät und besteht aus Komponenten höchster Qualität. Mit der richtigen Pflege ermöglichen Sie eine lange Lebensdauer und Funktionstüchtigkeit.

Um Schäden zu vermeiden, sollten Sie folgende Reinigungs- und Desinfektionsanweisungen befolgen:

Bitte reinigen Sie Ihre Lupe mit einem auf Alkohol basierenden Reinigungstuch oder einer Linsenreinigungslösung. Für die Linsenflächen verwenden Sie bitte das beiliegende Microfasertuch, das für die Reinigung von beschichteten Linsenoberflächen geeignet ist. Auf Alkohol basierende Reinigungstücher können, je nach Alkoholgehalt, Streifen auf der Linsenfläche hinterlassen, die Sie mit dem beigelegten Reinigungstuch einfach entfernen können.

Für die Desinfektion empfehlen wir alkoholarme Desinfektionstücher wie z. B. Plastisept von der Firma Alpro.

### BITTE BEACHTEN:

- Halten Sie die Lupe nicht unter Wasser!
- Reinigen Sie die Lupe nicht im Ultraschallbad!
- Sprühen Sie nie direkt auf Ihre Lupe!
- Verwenden Sie keinen Autoklaven, Chemiklaven, Glutaraldehyd, Iodophor oder eine andere Sterilisations-Methode!
- Nutzen Sie keinen Alkoholreiniger über 70%
- Verwenden Sie keine Papiertücher um die Linse zu reinigen

### LUPEN-PRÄZISIONS-SERVICE

Sie brauchen eine (neue) Sehstärke in Ihrer Lupe? Dann rufen Sie uns an! Unser Optiker-Team hilft Ihnen gerne weiter.

### INSPEKTIONSSERVICE

Damit Sie über viele Jahre ungetrübt Freude an Ihrer Lupe haben, empfehlen wir unseren jährlichen Inspektionsservice.

Er umfasst alle technischen Kontrollen und Justierungen sowie die spezifische Reinigung und Konservierung der Optiken – natürlich streng nach Herstellervorgaben.



Ihre direkte Verbindung  
zum Optiker-Team

Telefon: +49 461 - 957 88 27

E-Mail: [servicecenter@sigmadental.de](mailto:servicecenter@sigmadental.de)

 **sigma**DENTAL  
Für Kenner der Zähne

SIGMA DENTAL OPTICS GMBH  
Heideland 22 | D-24976 Handewitt | Germany

[www.sigmadental.de](http://www.sigmadental.de)



 **KURZANLEITUNG**  
Lupe

Stand 09/2021

# ERSTE SCHRITTE

## PRÄZISIONSABSTIMMUNG

Ihre Lupenbrille wird vor Auslieferung von speziell ausgebildeten Optikern umfassend getestet und eingestellt.

Trotzdem kann noch eine individuelle Anpassung an Ihre Gesichtsanatomie nötig sein. Lesen Sie bitte die folgenden Anleitungen dazu.

### I. Brillengestell ausrichten

- Setzen Sie die Lupenbrille vor einem Spiegel auf.
- Der obere Rand des Gestells und Ihre Pupillen sollten auf einem geraden Level sein.




- Ist das nicht möglich, lässt sich die Brille durch Einstellen des Nasenstegs, der Bügelenden und des Kopfbandes nachjustieren.

### II. Nasensteg einstellen

Die Nasenstege an den Brillengestellen (gilt für alle Orascoptic-Modelle) sind verstellbar. Biegen Sie die Enden des Nasenstegs leicht nach außen oder innen für einen angenehmen Tragekomfort.


- Tieferer Sitz des Gestells: Nasensteg leicht aufbiegen.
- Höherer Sitz des Gestells: Nasensteg leicht zusammendrücken.

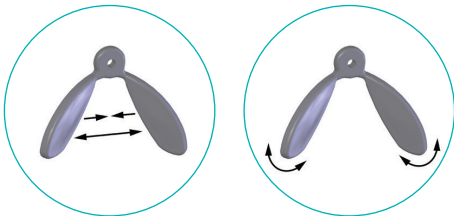

### III. Bügelenden justieren

Für einen besseren Halt und mehr Tragekomfort, können Sie die Bügelenden Ihrer Ohrform bzw. Kopfform anpassen.


- Drücken Sie langsam mit beiden Daumen die Spitze des Bügelendes vorsichtig herunter.
- Setzen Sie zwischendurch die Lupenbrille immer wieder auf und kontrollieren Sie den Sitz bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.

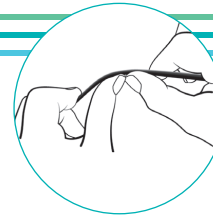

### IV. Kopfband einstellen

Für zusätzlichen Komfort und eine optimale Gewichtsverteilung der Lupenbrille empfehlen wir die Verwendung eines Kopfbandes.

- Setzen Sie Ihre Lupenbrille auf und ziehen Sie das Kopfband mit dem Kordelstopper fest bis die Brille bequem sitzt.
- Sollten Sie die Lupenbrille einmal nicht benötigen, tragen Sie diese bitte auf keinen Fall am Brillenband um den Hals hängend. Aufgrund des Gewichtes der Lupenbrille kann es evtl. zu einem Abrutschen der Brille kommen.
- Um das Gestell wieder abzunehmen, lockern Sie das Band, fassen die Brille an beiden Seitenbügelnden und nehmen sie nach oben ab.

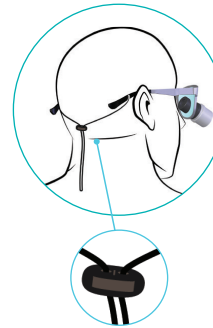

 Sollten diese Schritte nicht funktionieren, rufen Sie gerne unser Optiker-Team an.

## INFO:

Beim Gebrauch einer Lupenbrille oder beim Wechsel von einer niedrigen zu einer höheren Vergrößerung kann es anfänglich evtl. zu leichten Desorientierungen kommen. In solchen Fällen empfiehlt sich eine zwei- bis dreiwöchige Eingewöhnungszeit. Tritt sogar ein leichtes Schwindelgefühl auf, nutzen Sie die Lupenbrille anfangs nur stundenweise und für einfache Behandlungen. Sobald sich Ihre Augen an die Vergrößerung gewöhnt haben und Ihre Hand-Augen-Koordination eingespielt ist, können Sie die Tragezeit allmählich verlängern.

### V. Einstellbare Vergrößerung

„EyeZoom“ bietet die Möglichkeit durch einen kleinen Dreh an den Okularen den Wechsel zwischen den Vergrößerungen.

- Drehen Sie den geriffelten Ring in Pfeilrichtung, um die Vergrößerung zu ändern.
- Stellen Sie sicher, dass beide Okulare auf die gleiche Vergrößerung eingestellt sind.



„OmniOptic“ ermöglicht den sekundenschnellen Wechsel dank Magnettechnik.

- Setzen Sie ein Okularpaar in die Verankerung. Es wird automatisch magnetisch fixiert und sitzt dank der Keilnut besonders sicher.
- Um die Okulare aus der Verankerung zu nehmen, halten Sie das Gestell mit einer Hand fest, während Sie die Okulare vorsichtig und mit wenig Kraftaufwand aus der Verankerung ziehen.
- TIPP! Die nichtverwendeten Okularpaare sollten Sie zur Sicherheit in Ihrer Brillenbox aufbewahren.

